

## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

### Votre Partenaire Sommeil

Le Somno-Art Device est un dispositif médical qui enregistre le rythme cardiaque et les mouvements du bras d'un adulte pendant son sommeil.



## 1 - Le Somno-Art Device

Somno-Art Device est composé :

- d'un boîtier d'enregistrement
- d'un manchon textile permettant de porter le boîtier d'enregistrement

### 1 - Boîtier d'enregistrement



- (a) LED mémoire  
(b) LED d'enregistrement  
(c) LED batterie  
(d) Bouton Bluetooth  
(e) Bouton Événement  
(f) Port USB  
(g) Bouton ON/OFF

### 2 - Manchon textile



- (h) Attaches du dispositif de mesure  
(i) Bande Velcro  
(j) Fenêtre translucide d'accès aux LEDs et boutons

## 2 - Installation




Recharger complètement le Somno-Art Device avant la première utilisation.

### 1 - Fixer le boîtier dans le textile

Ouvrir le manchon textile à l'aide des Bandes Velcro (a) et fixer le boîtier en insérant les extrémités dans les encoches prévues à cet effet (b).

Une fois l'appareil en place, rabattre la bande velcro gauche sur le boîtier et fermer le manchon avec la bande velcro "Somno-Art" située à droite. (c).

## 3 - Mise en route et calibration

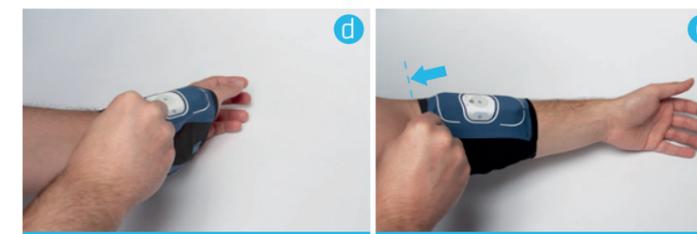

### 2 - S'équiper du Somno-Art Device

Choisir le bras non dominant (le bras gauche pour un droitier). Commencer par positionner les lanières velcro et enfiler le manchon sur l'avant-bras. Le dispositif doit être placé sur le haut de l'avant-bras (d).

**!** Le Somno-Art Device doit être installé sur une peau propre et sans blessure

Ajuster le serrage grâce à la lanière velcro du manchon textile (e). Le serrage ne doit pas être trop important, mais suffisant pour que le dispositif ne bouge pas quand le bras est dirigé vers le bas. De préférence, positionner le grand capteur à l'intérieur de l'avant-bras.



### 1 - Mise en route du Somno-Art Device


Pour allumer le dispositif en fonctionnement manuel, maintenir le bouton ON/OFF enfoncé pendant 2 secondes. Il va émettre deux courtes vibrations et automatiquement afficher son état de fonctionnement pendant 10 secondes.

**i** En fonctionnement automatique, le dispositif s'allume seul et ne peut être allumé en dehors des heures d'enregistrement programmées, sauf pour afficher l'état de la mémoire et de la batterie.

### 2 - Affichage de l'état du Somno-Art Device

L'affichage de l'état de fonctionnement du bracelet dure 10 secondes et indique les informations suivantes :

- 🔋 Niveau de la batterie du dispositif
- 📄 Niveau de la mémoire

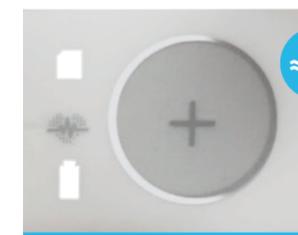

### 3 - Phase de calibration

Une fois l'affichage de l'état de fonctionnement terminé, la phase de calibration du dispositif démarre automatiquement à chaque enregistrement.

Au cours de la calibration, les LEDs clignotent toutes en blanc l'une après l'autre. Quand la calibration est réussie, les LEDs s'affichent en vert pendant 4 secondes.

**i** Durant cette phase, il est recommandé de ne pas bouger le bras. La calibration dure environ 1 minute et plus en cas de mouvements. Si les LEDs sont orange en continu, cela signifie que la calibration a échoué. Éteindre le dispositif (appuyer 5 secondes sur le bouton ON/OFF), le replacer sur l'avant-bras et le rallumer (2 secondes sur le bouton ON/OFF).

## ! AVERTISSEMENTS

- Ne PAS ouvrir, altérer ou modifier le dispositif.
- Ne PAS charger l'appareil lorsqu'il est porté.
- Ne PAS utiliser l'appareil si vous êtes allergique à l'un de ses composants.
- Ne PAS porter l'appareil sur une peau blessée ou sale.
- Ne PAS mettre l'appareil en contact avec de l'eau, que ce soit pour le nettoyage ou toute autre raison.
- Ne PAS trop serrer le manchon textile.
- Ne PAS exposer le dispositif à des températures extrêmes (en dehors de 10°C et 40°C).
- Ne PAS exposer à un fort taux d'humidité (en dehors de +30% et +75%).
- En cas de dysfonctionnement ou de détérioration du dispositif, contacter l'équipe d'assistance Somno-Art Device.

ASSISTANCE SOMNO-ART :  
4E avenue du Général de Gaulle  
68000 COLMAR France  
+33 (0)3 89 20 19 51  
support@somno-art.com

